

Tondeuse chirurgicale 3M™ à tête pivotante Réf. 9661L



Protocole d'utilisation

Mise en place de la lame

Fixation



- Interrupteur en position OFF.
- Basculer la tondeuse de 45° par rapport à la lame.
- Insérer une nouvelle lame à usage unique.
- Un "clic" confirme la fixation correcte de la lame.

Retrait



- À l'aide du pouce, pousser la lame pour la faire tomber dans un container à déchets.
- **Utiliser une nouvelle lame pour chaque nouveau patient.**

Utilisation de la tondeuse chirurgicale 3M™

Vers l'avant



- Incliner la tondeuse de 15 à 30° par rapport à la surface cutanée et pousser la tondeuse délicatement vers l'avant.
- Tondre à rebrousse-poil pour de meilleurs résultats.

Vers l'arrière



- Faire pivoter la lame de 180°.
- Incliner ensuite suivant un angle de 15 à 30° par rapport à la surface cutanée.
- Tirer la tondeuse vers soi ou "ratisser" délicatement.
- Ne jamais appuyer de façon excessive.

Entretien

Immersion et rinçage



- En position "OFF", retirer la lame.
- Rincer la tête de la tondeuse sous l'eau courante avant désinfection.
- La tondeuse peut être immergée au maximum 30 min.

Désinfection et séchage



- Appliquer une solution de désinfection à l'aide d'une compresse.
- Sécher avec une compresse.

Recharge de la tondeuse



- Autonomie : 160 min.
- Cycle de charge et charge initiale : 4 heures
- Laisser la tondeuse en charge entre les utilisations (pas de risque de surcharge).

Indicateur lumineux de la batterie :

- vert : chargée,
- orange clignotant : à recharger.

* 3M Science. Au service de la Vie.

IPD-000948 - Oct. 2016 - 3M est une marque déposée de 3M Company. Photos non contractuelles - Dispositif Médical de classe I selon la Directive 93/42 relative aux Dispositifs Médicaux. Marquage CE. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Distribué par 3M France - Bd de l'Oise - 95 006 Cergy-Pontoise Cedex