

exeol wipes optimal

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool

Lingettes pré-imprégnées :


► **Application dispositif médical** : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.

► **Application produit biocide** : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.




SURFACES


Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'emballage. exeol wipes optimal est prêt à l'emploi.

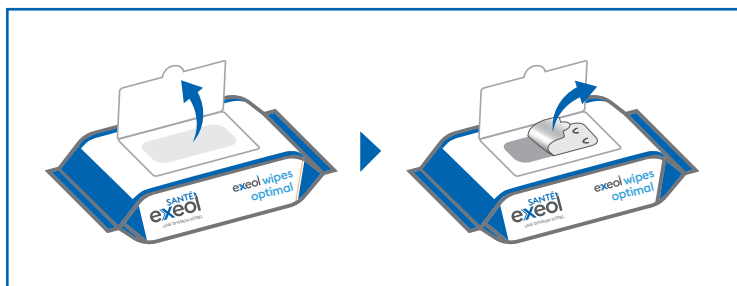


Lors de la première utilisation, ouvrir le sachet et ôter l'opercule.

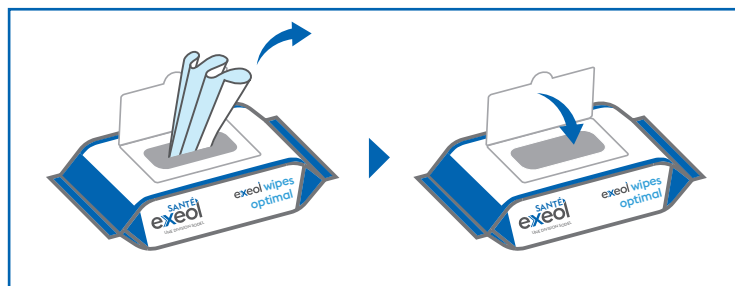


1 Prélever une lingette. Refermer le sachet après utilisation.

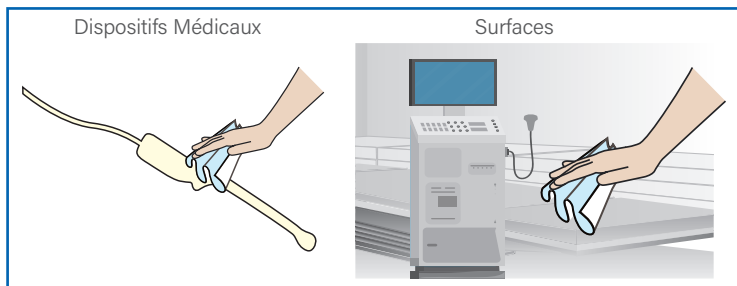

2 Essuyer minutieusement la surface à traiter. Utiliser le nombre de lingettes nécessaires (2 lingettes/m²).

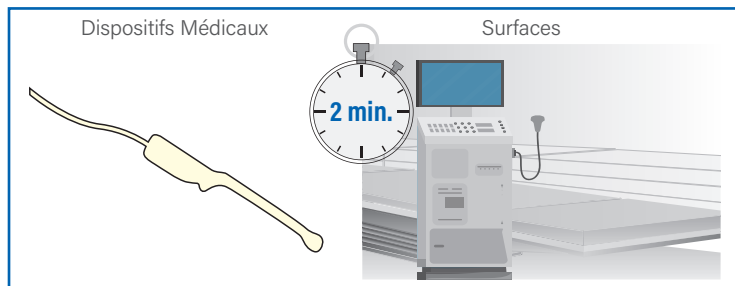

3 Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché.

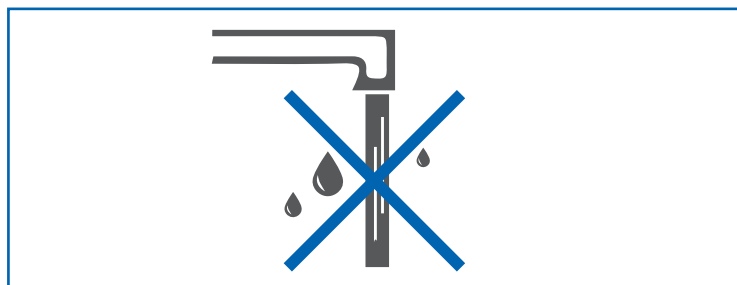

4 Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact direct avec les muqueuses, les denrées alimentaires ou si une étape de désinfection consécutive est requise).

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.
Délai de conservation après ouverture : 3 mois.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. *Sachet mono-matière : conçu pour être recyclable.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol

UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

DM classe IIa
Marquage CE obtenu en 2023

CE 0459

